



Ficha técnica

MENTONERA DOBLE SOPORTE

Marca: DEEPREST

- Peso: 40 gramos
- Medidas: 66 cm
- Materiales: velcro, neopreno, hilo venus c75

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para uso durante el tratamiento de apnea del sueño.
- Ayuda a mantener la boca mas cerrada durante el sueño.
- Sostiene el mentón con dos soportes para mayor apoyo.

MODO DE USO:

- Lavar la cara antes de ponerse la mentonera, para evitar que se concentren impurezas en el material.
- Identificar el punto medio de la mentonera y ubicarlo en la parte media del menton.
- Ubicar el velcro delgado en la parte de arriba de la cabeza y el mas ancho en la parte de atrás a la altura de la nuca. Cerrar los velcros hasta q la mentonera cierra la boca.

Ten en cuenta...

- La vida útil de la mentonera es de máximo 2 meses.
- La mentonera se lava a mano con jabón suave. No usar lavadora ni secadora.
- Por naturaleza abrimos la boca al dormir, por lo tanto no apretar mucho la boca con la mentonera

Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506
Tel. 5203190 - 5184811
Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximediacol

www.oximedica.com