



## Ficha técnica

# MÁSCARA PHANTOM 2 NASAL - ADULTO

Marca: Sleepne

La máscara nasal con ventilación Phantom®2 Diseñada para usarse con dispositivos de presión positiva de las vías respiratorias, como CPAP, operando a más 3 cm H<sub>2</sub>O o más. La máscara es para pacientes adultos (> 30 kg). Esta máscara se diseñó para que la use un único paciente varias veces en su casa, en el hospital o en un entorno institucional. Máscara con tecnología Custom Fit que permite ajuste personalizado gracias a su carcasa moldeable. El producto no se fabrica con látex de caucho natural, el sistema de máscara no contiene PVC, DEHP ni ftalatos y el gel de la máscara es inoloro.

- Dimensiones: Talla Única a 9,4 Profundo x 9 Ancho x 10,2 Alto
- Peso (gr): Talla única 70,3
- Resistencia al flujo de aire: A 50 l/min: 0,45 cm H<sub>2</sub>; A 100 l/min: 2,08 cm H<sub>2</sub>
- Volumen de espacio muerto (ml aprox.): : Mascarilla 30,7 ml / Tubo - 66 ml
- Vida Útil: De acuerdo a su uso.

Limpieza y mantenimiento:

- Se recomienda limpiar la máscara diariamente.
- Consulte las instrucciones de desmontaje.
- Lave la máscara y los componentes con agua tibia y un jabón suave.
- Enjuague la máscara cuidadosamente después de lavarla.
- Verifique visualmente que los orificios de ventilación estén despejados y deje secar la máscara al aire.
- Lávese la cara antes de ajustarse la máscara para retirar el exceso de oleosidad facial, esto extenderá la vida útil de la máscara, la almohadilla de gel no es indestructible
- Lave a mano el arnés en agua tibia utilizando un jabon suave. Una vez terminado el lavado, enjuague con abundante agua y deje secar al aire libre.

Almacenamiento:

- No exponga la máscara nasal con ventilación Phantom®2 a temperaturas superiores a los 122°F (50°C).
- Inspeccione la máscara a diario o antes de cada uso. En el caso de que los orificios de la máscara estén obstruidos, esta tenga alguna parte dañada o la almohadilla de gel presente perforaciones o roturas, cambie la máscara.
- A pesar de su tacto sedoso, la almohadilla de gel no se romperá, no tendrá fugas ni se separará de la máscara en circunstancias de uso normales.
- La almohadilla de gel no es indestructible, por lo que puede romperse, sufrir cortes y desgarrarse si está sometida a un uso indebido.