



Ficha técnica

MASCARA NASAL VENTILADA AURA – ADULTO

Marca: Sleepne

Está diseñada para servir de interfaz en la aplicación de terapias de presión positiva en las vías respiratorias, como las terapias de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) o las terapias de doble nivel. La máscara está pensada para la utilización exclusiva y repetida por parte de un solo paciente en el hogar, en hospitales o en entornos institucionales. El paciente debe ser un adulto (>66 lb/30 kg). La máscara no contiene Latex. El gel de la máscara es inoloro.

- Dimensiones de la máscara (cm):

Talla S: 9,6 Profundo x 6,9 Ancho x 13,9 Alto

Talla M: 9,6 Profundo x 7,2 Ancho x 13,9 Alto

Talla L: 9,6 Profundo x 8,1 Ancho x 13,9 Alto

- Peso (gr):

Talla S: 61,5

Talla M: 62,5

Talla L: 71,5

- Resistencia al flujo de aire: A 50 L/min: 0.22 cm H₂O; A 100 L/min: 0.95 cm H₂O

- Volumen de espacio muerto (ml aprox.):

- Talla S: 75 ml

Talla M: 82 ml

Talla L: 102 ml

Vida Útil: De acuerdo a su uso.

Limpieza y mantenimiento:

- Se recomienda limpiar la máscara diariamente.
- Consulte las instrucciones de desmontaje.
- Lave la máscara y los componentes con agua tibia y un jabón suave.
- Enjuague la máscara cuidadosamente después de lavarla.
- Verifique visualmente que los orificios de ventilación estén despejados y deje secar la máscara al aire.
- Lávese la cara antes de ajustarse la máscara para retirar el exceso de oleosidad facial; esto extenderá la vida útil de la máscara, la almohadilla de gel no es indestructible.
- ARNÉS: lave a mano el arnés en agua tibia utilizando un detergente suave. Una vez terminado el lavado, enjuague con abundante agua y deje secar al aire libre.

Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506

Tel. 5203190 - 5184811

Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximedicaol

www.oximedica.com