



Ficha técnica

MASCARA NASAL iQ2 – ADULTO

Marca: Sleepne

La mascarilla con ventilación nasal iQ®2 está diseñada para su uso con dispositivos de presión positiva en las vías respiratorias, como CPAP o en terapias binivel, que funcionen a 3 cm H₂O o más. La máscara está pensada para su uso en pacientes adultos (de más de 30 kg) para los que se haya prescrito una terapia de presión positiva en las vías respiratorias. La mascarilla está diseñada para múltiples usos en un mismo paciente en el entorno domiciliario, hospitalario o institucional. Máscara con tecnología Custom Fit que permite ajuste personalizado gracias a su carcasa moldeable.

No contiene latex y el gel de la máscara es inoloro.

- Dimensiones: Talla única 9,4 Profundo x 8,5 Ancho x 11,2 Alto
- Peso (gr): 70,1
- Resistencia al flujo de aire: A 50 L/min 0,45 cm H₂O; A 100 l/min 2,09 cm H₂O
- Volumen de espacio muerto (ml aprox.): Mascarilla – 47,3 ml / Tubo – 66 ml
- Vida Útil: De acuerdo a su uso.

Limpieza y mantenimiento:

- Se recomienda limpiar la máscara diariamente. Consulte las instrucciones de desmontaje.
- Lave la máscara y los componentes con agua tibia y un jabón suave.
- Enjuague la máscara cuidadosamente después de lavarla.
- Verifique visualmente que los orificios de ventilación estén despejados y deje secar la máscara al aire.
- Lávese la cara antes de ajustarse la máscara para retirar el exceso de oleosidad facial; esto extenderá la vida útil de la máscara,
- La almohadilla de gel no es indestructible.
- Lave a mano el arnés en agua tibia utilizando un detergente suave. Una vez terminado el lavado, enjuague con abundante agua y deje secar al aire libre.

Almacenamiento:

- No exponga la máscara nasal iQ®2 a temperaturas superiores a los 50°C
- Inspeccione la máscara a diario o antes de cada uso. En el caso de que los orificios de la máscara estén obstruidos, esta tenga alguna parte dañada o la almohadilla de gel presente perforaciones o roturas, cambie la máscara.
- La almohadilla de gel no es indestructible, por lo que puede romperse, sufrir cortes y desgarrarse si está sometida a un uso indebido.